

PuraStat®

Nowy peptydowy środek hemostatyczny

- Peptyd syntetyczny
- Biokompatybilny⁽¹⁾
- Gotowy do użycia, nie wymaga przygotowania
- Tworzy fizyczną barierę tamującą krwawienie
- Łatwy w użyciu materiał:
 - Lekko lepki roztwór odpowiedni do zastosowań w endoskopii i laparoskopii
 - Przejrzysty miękki żel
 - PuraStat nie powoduje zatkania aplikatora ⁽²⁾




DZIAŁANIE

PuraStat to lekko lepki roztwór peptydów syntetycznych.

Kontakt z krwią powoduje, że kwaśny roztwór peptydowy PuraStat ulega neutralizacji i pod wpływem działania jonów tworzy trójwymiarową strukturę przestrzenną w postaci harmonijki beta (beta-kartki).

Powstała w ten sposób bariera fizyczna zatrzymuje krwawienie w leczeniu operacyjnym różnego typu.

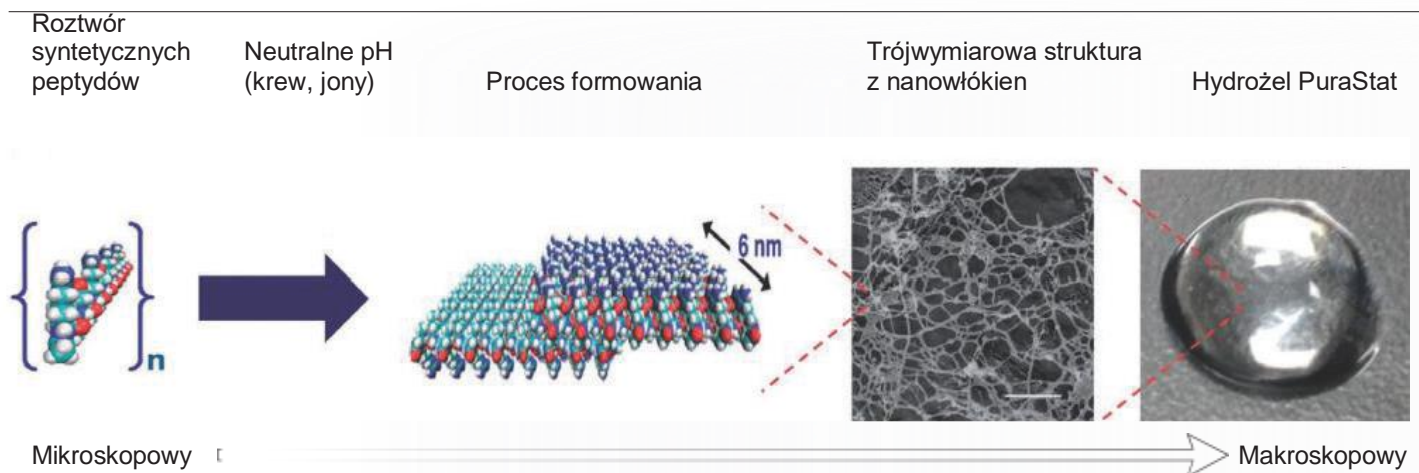

PuraStat tworzy fizyczną barierę tamującą krwawienie.

Środek hemostatyczny PuraStat jest biowchłaniały i znajduje zastosowanie w leczeniu chirurgicznym różnego typu.

Dostępny w opakowaniu o poj. 1 ml (nr art. 621-013), 3 ml (nr art. 621-014) i 5 ml (nr art. 621-015).

PuraStat®

Nowy peptydowy środek hemostatyczny

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Środek hemostatyczny PuraStat jest wskazany do stosowania w przypadkach, gdy inne metody tamowania krwawienia, np. podwiązanie, są niewystarczające lub niepraktyczne:

Typ krwawienia	Przykłady
Krwotok wysiękowy z naczyń krwionośnych i mięszu narządów litych	<ul style="list-style-type: none"> • Resekcja wątroby • Splenektomia • Cholecystektomia
Krwotok wysiękowy z anastomozy naczyniowej	<ul style="list-style-type: none"> • Anastomoza do naturalnego lub sztucznego naczynia • Operacja aorty i tętnic obwodowych • Pomostowanie aortalno-wieńcowe • Pomostowanie w przebiegu chorób tętnic udowych
	<ul style="list-style-type: none"> • Endoskopowe wycięcie błony śluzowej (EMR) przewodu pokarmowego • Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD) górnego odcinka przewodu pokarmowego

Dokładne wskazania i przeciwwskazania opisano w „Instrukcji stosowania”.

ZALETY

Peptyd syntetyczny	<ul style="list-style-type: none"> • materiał obojętny, bez ryzyka zanieczyszczenia ze źródła biologicznego
Prosty w użyciu	<ul style="list-style-type: none"> • dostarczany w formie gotowej do użycia, pojedynczej, fabrycznie napełnionej strzykawki • nie wymaga przygotowania • odpowiedni do zastosowań w endoskopii i laparoskopii • możliwość zakładania szwów i kauteryzacji
Przezroczysty środek hemostatyczny	<ul style="list-style-type: none"> • miejsce krwawienia jest wyraźnie widoczne
Możliwość usunięcia i ponownej aplikacji	<ul style="list-style-type: none"> • możliwość wielokrotnego stosowania w trakcie jednego zabiegu • w razie potrzeby środek można łatwo usunąć
Lekko lepki roztwór	<ul style="list-style-type: none"> • odpowiedni do zastosowań w endoskopii i laparoskopii • możliwość zastosowania w wąskiej przestrzeni • odpowiednie krycie nierównych powierzchni

 **3-D Matrix Europe SAS**
 11 chemin des Petites Brosses
 69300 Caluire-et-Cuire-FRANCE
 Tel: +33 (0) 4 27 19 03 40
 infoeu@puramatrix.com
 www.puramatrix.com

PuraStat to wyrób medyczny klasy 3 ze znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych i pokrewnych przepisów

